



**Стол массажный Comfort
Professional-M
Руководство по эксплуатации**

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	3
ОПИСАНИЕ И ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ	4
Массажные столы электрические «COMFORT»	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
Как отрегулировать высоту стола	5
Как отрегулировать положение подголовника	5
Как отрегулировать положение ножной секции стола	Ошибка! Закладка не определена.
Как использовать колеса	5
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	6
Невозможно изменить высоту стола	6
Диагностика и поиск неисправностей:	6
Инструкция по замене блока ножного управления	9
Инструкция по замене приводного двигателя	9
Инструкция по замене блока управления	11
Невозможно зафиксировать положение ножной секции	Ошибка! Закладка не определена.
УХОД ЗА ОБИВКОЙ	11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Ненадлежащая регулировка, эксплуатация или техническое обслуживание могут привести к травмированию пациента или обслуживающего персонала.



Для того чтобы избежать этой опасности, необходимо тщательно следовать приводимым в данном руководстве инструкциям.



При распаковке стола проверьте состояние обивочного материала и наполнителя обивки. При наличии каких-либо повреждений не следует пользоваться столом (наша гарантия не распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащей регулировкой оборудования, авариями, ненадлежащим обращением с оборудованием или неправильной его эксплуатацией).

Ограничения по весовой нагрузке (включая вес пациента и аксессуары):

Массажные столы электрические «COMFORT»– 350 кг



Перед размещением на столе пациента **УБЕДИТЕСЬ** в том, что стол располагается правильно, без наклонов и перекосов. В противном случае пациент может потерять равновесие и упасть.

Опасность поражения электротоком:



Блок питания/блок управления расположен под столом. Из соображений техники безопасности не следует дотрагиваться до него во время работы стола. Необходимо выполнить всю подготовительную работу до включения вилки в сетевую розетку. Перед использованием стола следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

НЕ СЛЕДУЕТ прилагать избыточное давление или весовую нагрузку к подголовнику или удлиняющей секции стола.

НЕ СЛЕДУЕТ подвергать оборудование воздействию чрезмерной влажности или температуры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Вес данных моделей столов составляет около 80 кг.

НЕ СЛЕДУЕТ класть столы набок, не предприняв перед этим соответствующие меры защиты.



Ни при каких обстоятельствах не следует забираться под стол или ножницеобразную конструкцию во избежание травмирования при неожиданном складывании стола.



Держите стол для массажа вне досягаемости детей и животных. Не позволяйте детям и животным забираться под ножницеобразную конструкцию стола во избежание возможного поражения электротоком или травмирования при складывании стола.



Не оставляйте и не храните какие-либо вещи внутри ножницеобразной конструкции или под платформой стола.

ОПИСАНИЕ И ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как отрегулировать высоту стола

Массажные столы электрические «COMFORT» поставляется с системой настройки высоты при помощи ножного управления.

Система ножного управления

Используйте систему ножного управления как показано ниже для того, чтобы увеличить или уменьшить высоту стола. Используя системы управления столом, тщательно соблюдайте все предостережения и рекомендации, приведенные в данном руководстве.



Как отрегулировать положение подголовника и/или ножной секции

Для того чтобы поднять подголовник, возьмитесь за него и тяните вверх до тех пор, пока он не поднимется на нужный вам угол. Подголовник автоматически надежно фиксируется в выбранном положении.

Для того чтобы опустить подголовник, поверните отпускную рукоятку вверх, слегка приподнимите подголовник и опустите его в желаемое положение. После этого высвободите рукоятку, и подголовник автоматически зафиксируется в выбранном положении.



Как использовать колеса

Массажные столы электрические «COMFORT» оснащены стопорными колесами, по два с каждой стороны.



**Регулировка
при помощи
ног**

1. Подкатите стол на место, где вы планируете его использовать.

2. Для того чтобы заблокировать колеса, нажмите рукой или ногой на стопор, сдвигая его в направлении вниз.

3. При необходимости передвинуть стол, верните стопор в исходное положение (мы рекомендуем делать это при помощи ног).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Невозможно изменить высоту стола

Диагностика и поиск неисправностей:

Моторный блок стола выглядит следующим образом:



1. Индикаторная лампа не горит

Замечание: Убедитесь, что все коннекторы надежно вставлены в соответствующие гнезда. Даже небольшое нарушение контакта может привести к сбою в функционировании системы.

Индикаторная лампа



Убедитесь, что сетевой шнур подключен к розетке.




Шаг 1: Вытащите вилку сетевого шнура из розетки.




Шаг 2: Найдите другую розетку, гарантированно являющуюся рабочей, и подключите сетевой шнур к ней.

Проверьте блок управления и убедитесь в том, что сетевой шнур надежно подключен в соответствующее гнездо блока.

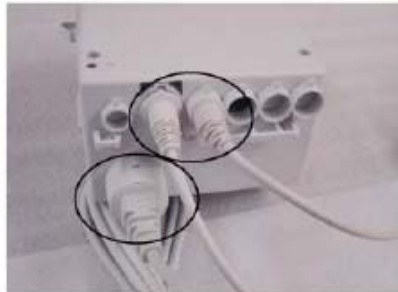

Надежное соединение

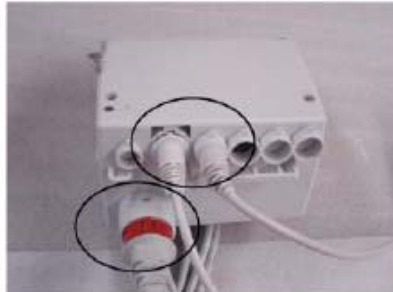

Ненадежное соединение



Извлеките сетевой шнур из гнезда блока управления и вставьте его заново.

Если после выполнения всех приведенных выше действий индикаторная лампочка так и не загорится, это будет означать, что блок управления вышел из строя и требуется его замена (см. инструкции по замене блока питания).

2. Индикаторная лампочка горит, но изменить высоту стола не получается



Предостережение: Вес стола составляет около 80 кг. При необходимости положить стол набок следует предпринимать все меры предосторожности. Для обеспечения безопасности данного процесса необходимы помощники.

Переместите стол в помещение с низким уровнем шума и попробуйте использовать блок ножного управления. Прислушайтесь: и блок управления столом, и блок ножного управления должны издавать щелчок при нажатии ногой на блок ножного управления.



При включенном питании блок управления должен издавать щелчок в случае нажатия на блок ножного управления.



При включенном питании блок ножного управления должен издавать щелчок, когда вы наступаете на него.

Результат 1: Если вы не слышите щелчка, издаваемого блоком ножного управления при нажатии на него, это означает, что блок поврежден и требует замены (см. инструкцию по замене блока ножного управления).

Результат 2: Если при включенном питании и горящей индикаторной лампочке вы наступаете на блок ножного управления и не слышите щелчка блока управления столом, необходимо проверить правильность подключения кабеля системы ножного управления к блоку управления столом. Если подключение правильное, то это означает, что блок управления вышел из строя и должен быть заменен (см. инструкцию по замене блока управления).



Разъем системы ножного управления находится на конце соответствующего кабеля. На блоке управления столом находится соответствующее гнездо.



Правильное подключение

Результат 3: Если после выполнения описанных выше действий вам так и не удалось изменить высоту стола, и при этом индикаторная лампочка горит, все кабели надежно подключены, а оба блока управления издадут щелчки при нажатии на блок ножного управления, то это означает, что привод устройства поврежден и требуется его замена.

Примечание: Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию на привод (включая собственно привод и блок управления) с момента приобретения оборудования.

Если Ваш стол после всех описанных выше действий так и не начал правильно функционировать, пожалуйста, свяжитесь с Вашим продавцом для обсуждения вопроса о замене.

Инструкция по замене блока ножного управления



Предостережение: Перед тем, как проводить любые операции с оборудованием, следует отключить его от сети питания.

Замена блока ножного управления необходима в случае, когда блок не обеспечивает функцию подъема стола.

Для того чтобы заменить блок ножного управления, необходимо выполнить следующие действия:

1. Система ножного управления подключается к блоку управления при помощи соответствующего кабеля. Снимите фиксатор экранированных кабелей с блока управления и аккуратно извлеките кабель блока ножного управления из гнезда.



Снимите фиксатор экранированных кабелей.



Извлеките кабель блока ножного управления из гнезда.

2. Возьмите новый блок ножного управления.

3. Подключите кабель нового блока в гнездо блока управления и установите на место фиксатор кабелей.

Инструкция по замене приводного двигателя

1. Вытащите сетевой шнур из розетки.

Заблокируйте все 4 колеса стола и осторожно положите стол набок. В качестве мер предосторожности при опрокидывании стола настоятельно рекомендуется воспользоваться помощью других людей.



Положите стол набок.



Снимите фиксатор кабелей.

2. Отключите кабель привода от блока управления.



Отсоедините кабели привода от блока управления.

3. Если вам необходимо заменить основной привод, отсоедините его от блока управления. Если вам необходимо заменить субпривод, эта операция необязательна.



Используя отвертку, выкрутите соединительный винт.



Для отсоединения блока управления от основного привода сдвиньте его по направлению вверх.

4. При помощи пинцета снимите пружинный зажим с обоих концов привода.




Пружинный зажим располагается на обоих концах основного привода.

Место расположения пружинного зажима на обоих концах субпривода



Снимите пружинный зажим и извлеките болт.

5. Отсоедините привод от стола.

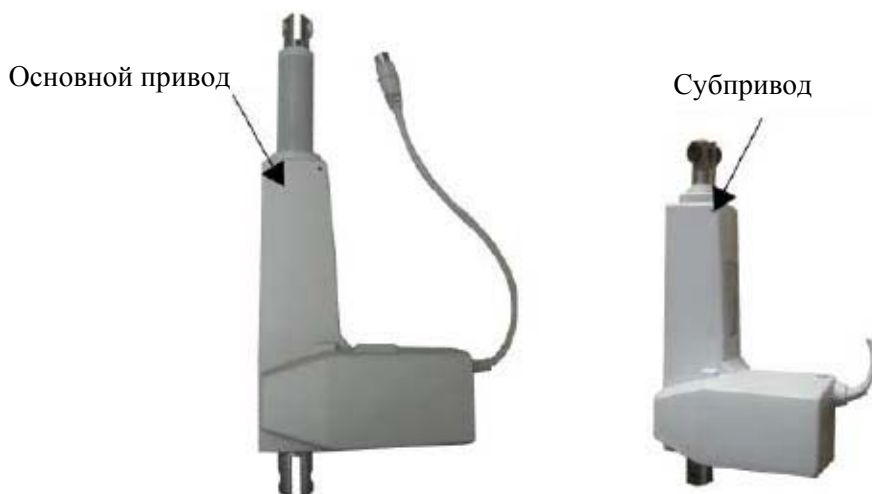

Отсоедините привод от стола.

6. Возьмите новый привод.
7. Действуя в обратном порядке, установите на стол новый привод.

Инструкция по замене блока управления

Выполните шаги 1-3 инструкции по замене привода (см. выше).

1. Возьмите новый блок управления.
2. Установите новый блок управления.

УХОД ЗА ОБИВКОЙ

Поздравляем Вас с приобретением массажного стола. Для того чтобы сохранить высокое качество оборудования и продлить срок его службы, мы рекомендуем Вам выполнять определенные профилактические действия для защиты обивки стола и аксессуаров:

- Хранение стола при слишком низких температурах может привести к растрескиванию обивки. Таким образом, избегайте хранения массажного стола в неотапливаемых помещениях в холодное время года.
- Хранение стола при слишком высоких температурах может привести к растяжению обивочного материала и появлению на нем морщин и складок. Таким образом, стол не должен располагаться слишком близко к отопительным приборам и электрооборудованию. Следует избегать попадания на него прямого солнечного света.
- Необходимо защищать стол и аксессуары (подголовники и подлокотники) при помощи простыней и покрывал. Предлагаемый нами набор из одноразовых или многоразовых чехлов позволят защитить стол от попадания на его поверхность масла, одновременно обеспечивая комфорт Ваших клиентов.
- Ежедневно выполняйте очистку обивки стола. Необходимо помнить, что Полиуретановая или Виниловая искусственная кожа, которая применяется в обивке стола, имеет структуру, близкую к натуральной. Она имеет микropоры и использование химических обеззараживающих реагентов приводит к проникновению их внутрь матраса. В конечном итоге, окислительные агенты, используемые при дезинфекции, приводят к нарушению эластичности покрытия и его растрескиванию. Только при индивидуальном использовании можно допускать эксплуатацию без дополнительного одноразового или многоразового дополнительного покрытия.

Чистить обивку необходимо при помощи мягких детергентов, позволяющих удалять масляные пятна и прочие загрязнения, способные привести к растрескиванию обивки или

появлению на ней пятен. Как правило, для чистки обивки используется следующий чистящий раствор: небольшое количество антибактериального мыла для мытья посуды растворяется в воде, полученный раствор распыляется на поверхность стола, а затем стол протирается влажной чистой тряпкой.

- Следует защищать стол от появления на нем потертостей, порезов и проколов.
- Не следует применять хлорсодержащие дезинфекционные средства..

Предостережение



1. Протирание поверхности стола спиртом приводит к пересыханию виниловой обивки и появлению на ней трещин.
2. Продолжительное воздействие чрезмерно высоких или низких температур может привести к повреждению виниловой обивки.
3. Высокая влажность сокращает срок службы привода; поэтому следует держать стол подальше от воды.