



Руководство по эксплуатации

Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	3
ОПИСАНИЕ И ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
Как отрегулировать высоту стола.....	5
Как отрегулировать положение подголовника.....	5
Как отрегулировать положение ножной секции стола.....	5
Как использовать колеса	6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Ненадлежащая регулировка, эксплуатация или техническое обслуживание могут привести к травмированию пациента или обслуживающего персонала.



Для того чтобы избежать этой опасности, необходимо тщательно следовать приводимым в данном руководстве инструкциям.



При распаковке стола проверьте состояние обивочного материала и наполнителя обивки. При наличии каких-либо повреждений не следует пользоваться столом (наша гарантия не распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащей регулировкой оборудования, авариями, ненадлежащим обращением с оборудованием или неправильной его эксплуатацией).

Ограничения по весовой нагрузке (включая вес пациента и аксессуаров):

★215 кг



Перед размещением на столе пациента **УБЕДИТЕСЬ** в том, что стол располагается правильно, без наклонов и перекосов. В противном случае пациент может потерять равновесие и упасть.



Опасность поражения электротоком:

Блок питания/блок управления расположен под столом. Из соображений техники безопасности не следует дотрагиваться до него во время работы стола. Необходимо выполнить всю подготовительную работу до включения вилки в сетевую розетку. Перед использованием стола следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

НЕ СЛЕДУЕТ прилагать избыточное давление или весовую нагрузку к подголовнику или удлиняющей секции стола.

НЕ СЛЕДУЕТ подвергать оборудование воздействию чрезмерной влажности или температуры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Вес данных моделей столов составляет 82 кг.

НЕ СЛЕДУЕТ класть столы набок, не предприняв перед этим соответствующие меры защиты.



Ни при каких обстоятельствах не следует забираться под стол или ножницеподобную конструкцию во избежание травмирования при неожиданном складывании стола.



Держите стол для массажа вне досягаемости детей и животных. Не позволяйте детям и животным забираться под ножницеподобную конструкцию стола во избежание возможного поражения электротоком или травмирования при складывании стола.




Не оставляйте и не храните какие-либо вещи внутри ножницеподобной конструкции или под платформой стола.

ОПИСАНИЕ И ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ



Грузоподъемность	195 кг (распределенная нагрузка)
Вес	80 кг
Диапазон регулировки высоты	52-97.5 см
Ширина	69, 70 или 75 см
Длина	190 см (включая подголовник)
Набивка	Вспененный материал толщиной 2.5 или 3 дюйма
Обивка	ПВХ или полиуретан

Грузоподъемность	190 кг (распределенная нагрузка)
Вес	82 кг
Диапазон регулировки высоты	52-97.5 см
Ширина	69, 71 или 75 см
Длина	190 см (включая подголовник)
Набивка	Вспененный материал толщиной 2.5 или 3 дюйма
Обивка	ПВХ или полиуретан

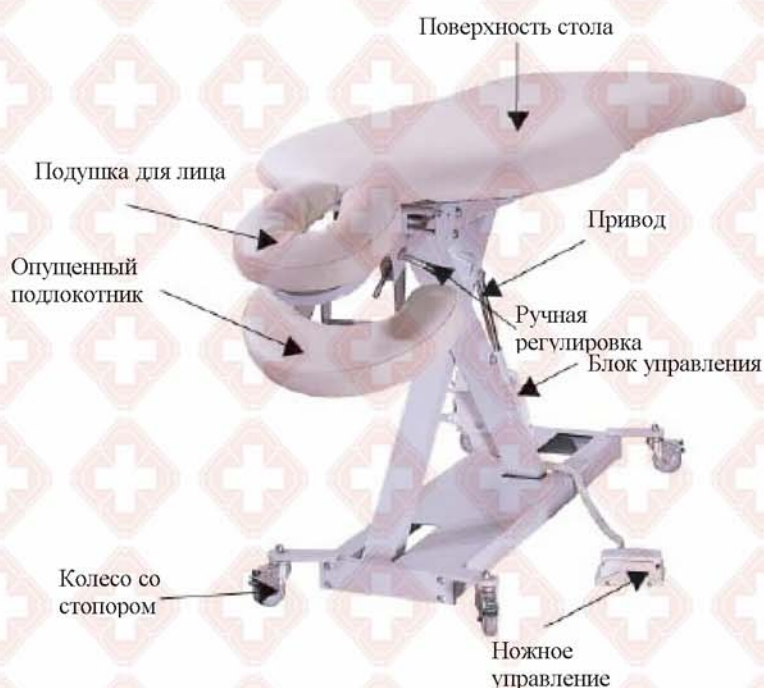

Грузоподъемность	215 кг (распределенная нагрузка)
Вес	76 кг
Диапазон регулировки высоты	52-97.5 см
Ширина	69, 70 или 75 см
Длина	195 см (включая подголовник)
Набивка	Вспененный материал толщиной 2.5 или 3 дюйма
Обивка	ПВХ или полиуретан

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как отрегулировать высоту стола

Столы поставляются с двумя системами ножного управления (одна отвечает за регулировку высоты стола, а вторая – за функцию midlift).

Система ножного управления

Используйте систему ножного управления как показано ниже для того, чтобы увеличить или уменьшить высоту стола. Используя системы управления столом, тщательно соблюдайте все предостережения и рекомендации, приведенные в данном руководстве.



Как отрегулировать положение подголовника

Для того чтобы поднять подголовник, возьмитесь за него и тяните вверх до тех пор, пока он не поднимется на нужный вам угол. Подголовник автоматически надежно фиксируется в выбранном положении.


Для того чтобы опустить подголовник, поверните отпускную рукоятку вверх, слегка приподнимите подголовник и опустите его в желаемое положение. После этого высвободите рукоятку, и подголовник автоматически зафиксируется в выбранном положении.



Как отрегулировать положение ножной секции стола

Для того чтобы поднять ножную секцию, возьмитесь за нее и приподнимите вверх до тех пор, пока она не окажется в требуемом положении. После того как вы ее отпустите, она автоматически зафиксируется в выбранном положении. Если вы захотите увеличить угол подъема, просто повторите описанное выше действие.

Для того чтобы опустить ножную секцию, возьмитесь за нее покрепче и поверните отпускную рукоятку вверх, после чего опустите ножную секцию в требуемое положение. После этого высвободите рукоятку, и секция автоматически зафиксируется в выбранном положении.

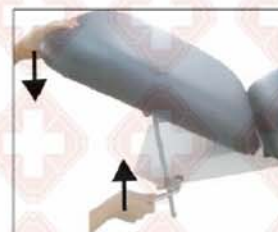

Как использовать колеса

Массажные столы оснащены двумя стопорными колесами, по одному с каждой стороны.



Регулировка при помощи рук



Регулировка при помощи ног



1. Подкатите стол на место, где вы планируете его использовать.

2. Для того чтобы заблокировать колеса, нажмите рукой или ногой на пластиковый стопор, сдвигая его в направлении вниз.

3. При необходимости передвинуть стол, верните стопор в исходное положение (мы рекомендуем делать это при помощи ног).