

**Складной деревянный массажный стол с сумкой**  
**(8886 Стол массажный деревянный COMFORT ETL57)**



**Описание модели**

Массажный стол, включающий в себя деревянную подставку и проволочно-канатную конструкцию, устойчив и одновременно легок.

Предназначен для широкого применения в различных медицинских учреждениях, спортивных клубах, а так же салонах красоты.

Входящая в комплект сумка-чехол облегчает транспортировку, благодаря чему этот массажный стол так же может использоваться при процедурах, проводящихся на дому.

Имеется возможность регулировки высоты, что позволяет создать наиболее комфортные условия его использования. В столешнице предусмотрено отверстие для лица, исключающее неприятные ощущения при проведении различных процедур на спине.

Обшивка из искусственной кожи позволяет обеспечить легкость в уходе и износоустойчивость покрытия.

Выбирая нашу продукцию, вы можете быть абсолютно уверены в качестве, все предлагаемые столы подвергаются необходимым тестам и проверкам, в том числе в условиях, граничащих с максимальной нагрузкой.

**Технические характеристики**

Цвет Темно-синий с оттенком серого.

Гарантия 1 год

Длина 210 см

Вес 12 кг

Ширина 73 см

Толщина матраса 10 см

Максимальная нагрузка 204 кг

Высота 58 – 85 см  
Складной Да  
Подлокотники Есть  
Подголовник Есть  
Механическая регулируемая ножная часть Есть  
Механическая регулировка высоты Есть  
Сертификат РОСС CN.AE10 CO4829  
Основа: деревянная  
Комплектация: сумка-чехол


### **Гарантийные обязательства**

Гарантия на раму при домашнем использовании - 1 год.  
Гарантия на раму при коммерческом использовании - 6 месяцев.

### **Инструкция по эксплуатации**

Перед эксплуатацией стола внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению!

### **Разборка стола**

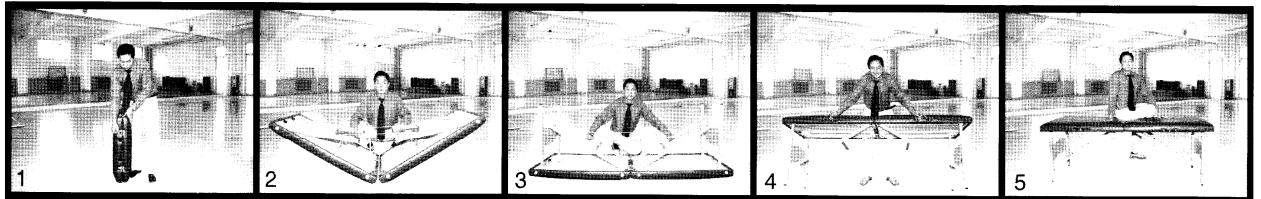

1. Следует открывать стол, как показано на картинке сверху.

Стол легко и быстро раскладывается полностью, достаньте со дна стола поочередно каждую ножку, протяните в них трос и зафиксируйте его специальным креплением на ножках. Стол сразу готов к эксплуатации.

2. Ножки стола позволяют регулировать его высоту, обеспечивая комфортные условия для работы специалиста. Изменить высоту стола очень легко, для этого требуется ослабить крепления на ножках стола, установить требуемую высоту ножек и вновь зафиксировать крепления.

3. Перед началом эксплуатации рекомендуется тщательно отрегулировать положение каждой секции стола (высоты стола).

4. Не скользящая поверхность стола обеспечивает его комфортное использование.

5. Перед эксплуатацией стола рекомендуется проводить очищение и дезинфекцию его поверхности, например, слабоконцентрированным жидким мылом. Не допускать длительного контакта массажных масел или химикатов с кожаной обивкой.

**Внимание!**

**Стол удобен для эксплуатации при любой высоте, однако следует учитывать небольшой люфт при максимальной нагрузке, вследствие особой конструкции выдвижных ножек стола.**

### **Разборка-сборка стола**

Чтобы разобрать стол, положите его ребром на пол и выдвиньте ножки. Потом поверните стол ножками вниз. Для сборки: Сложите стол, предварительно убедившись, что ножки и трос не препятствуют закрытию стола. С помощью защелки закройте стол.

Легкий и компактный массажный стол легко носить с собой!

### **Внимание!**

Наши столы сертифицированы, однако несоблюдение правил эксплуатации, не соответствующая комплекции пациента подготовка стола могут привести к случайным повреждениям!

Предусмотрена эксплуатация изделия в течение двух лет в соответствии с качеством материалов изготовления. Гарантийное обслуживание предполагает восстановление или замену обнаруженных в течение указанного времени недостатков. Если стол бракован, он будет реставрирован или заменен.

**Внимание! Гарантийному обслуживанию не подлежат массажные столы, поврежденные вследствие не закрепленных фиксаторами ножек и повреждения кожи химическими (дезинфицирующими) агентами.**